



# 송학교육통신

교  
훈

알차고 바르게  
푸른 꿈 키워가는  
어린이가 되자

우)54667 익산시 학곡로 57 교무실 063)855-3606

최근 오미크론이 확산됨에 따라 우리 아이들을 감염병으로부터 보호하기 위해서는 더욱 각별한 주의가 요구되는 상황입니다. 이에 새 학기 학교방역을 안정적으로 운영하기 위해 등교 전 선제 검사를 위한 신속항원검사(RAT) 키트를 지원하오니 아래의 사항을 유의하시어 사용해 주시길 당부 드립니다. (※ 선제검사는 권고사항으로 의무사항은 아님을 안내드립니다.)

※ 3.2(수) 제공되는 키트는 3.2(수) 저녁이나 3.3(목) 아침에 실시하여 주시기 바랍니다.  
(교육청 물량확보 시 추가 배부 예정)

※ 확진 후 격리해제자인 경우 최초 확진일로부터 45일 이내인 경우, 신속항원검사에서 양성(재검출)이 될 수 있으므로 검사 불필요 (다만, 의료기관 진료 후 의사가 판단한 경우 해당 기간 중 검사 가능)

## < 신속항원검사 실시 안내 >

- ▶ 보호자께서는 보내드리는 키트를 이용하여 가정에서 검사를 실시하여 주시고, 다음의 후속 조치 사항을 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

### < 검사 결과에 따른 협조사항>

#### ◇ 검사결과 음성

- 등교 전, 자가진단(앱)에 음성임을 입력하고 등교해주시기 바랍니다.
- 선별진료소·지정의료기관에서 별도 검사를 실시한 경우 발급된 음성 확인서로 대체

#### ◇ 검사결과 양성

- 즉시 담임교사에게 연락(문자 등)하여 주시고, 가까운 선별진료소에서 PCR검사를 실시하여 주시기 바랍니다.
- PCR 검사결과 음성인 경우에는 '음성 확인서'를 지참하여 등교하고, 양성인 경우에는 (담임)교사에게 연락하여 주시기 바랍니다.
- \* 음성확인서는 보건소에서 발급한 문자메시지 등으로 갈음할 수 있음

- ▶ 신속항원검사키트 자가검사 간단사용설명서를 첨부해드리니 참고하시고, 설명서 우측 상단 QR코드를 통해 사용방법 동영상을 확인하실 수 있습니다.
- ▶ 사용법 동영상 사이트 : <https://www.youtube.com/watch?v=cnUEp1BWelA>  
또는 학교 홈페이지 [전체공지- 코로나19 자가검사키트 사용법] 확인

2022년 3월 2일

이 리 송 학 초 등 학 교 장

## 신속항원키트 사용방법 (출처-SD바이오센서)

① 검사 전 손을 깨끗이 씻고 완전히 말립니다.

② 구성품(검사용 디바이스, 멸균 면봉, 용액통 (튜브), 노즐캡(필터캡), 사용설명서)을 확인합니다.

### 구성품



▶ 사용방법 동영상



### 사용 방법

\* 검사 시 장갑을 착용하십시오.

#### 1 용액 뚜껑 벗기기



#### 2 멸균 면봉 개봉



#### 3 검체 채취



#### 4 검체 버퍼 혼합




#### 5 노즐캡 눌러닫기




#### 6 검사용 디바이스에 4방울 떨어뜨리기




[음성]

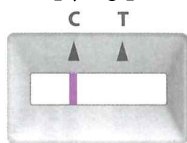

[양성]

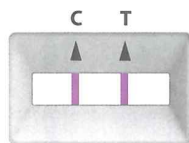

[무효]

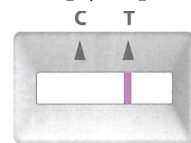

### 사용 시 주의사항 및 검사 결과

1. 용액이 코 점막이나 눈에 튀지 않도록 주의하고, 절대 섭취하지 않습니다.
2. 만 19세 미만이 사용할 경우에는 **보호자의 지도하에 사용**합니다.
3. 검사 결과 대조선(C)에만 한 줄로 나타나면 음성입니다.
4. **검사 결과 대조선(C)과 시험선(T)로 나타나면 양성**입니다. 두 줄로 확인된 키트를 투명한 봉투에 넣고 밀봉하여 **지참**하고 **신속하게 선별진료소 또는 임신선별검사소에 방문**합니다.
5. 검사 결과가 시험선에만 나타나거나, 아무런 선이 나타나지 않는다면 무효입니다.