

2022-6호

주 제

정 읍 남 교 육 통 신

〈학생 신속항원검사 시행 안내〉

학부모님, 안녕하십니까?

오미크론 확산 상황 및 정부 방역체계 전환으로 새 학기를 맞이하여 교육부에서는 안전한 학교생활을 위해 코로나19 선제 대응으로 신속항원검사(자가검사키트)를 지원합니다.

학부모님께서는 검사에 다소 어려움이 있으시겠지만, 학교 내 무증상 감염을 조기에 차단 하고자 함이오니 적극적인 협조를 부탁드립니다.

■ 지원 물량: 3월 1주 학생 1인 1개, 3월 2주~5주 학생 1인 2개, 총 9개 지원

■ 배부 방법: (1차) 3월 2일(수) 학교 시 학생 1인 1개 배부
이후 배부는 주간 단위로 2개씩 매주 금요일 배부 예정

■ 검사 시행: (교육부) 주 2회, 수요일과 일요일 저녁 시행 권장

일	월	화	수	목	금	토
[3월1주] 학생 주1회 [3월2주~3월5주] 학생 주2회, 교직원 주1회						
3월2주	6	7	8	9 선거일	10	11
3월3주	13	14	15	16	17	18
3월4주	20	21	22	23	24	25
3월5주	27	28	29	30	31	

1 **삼일절**

2 **(개학일)**

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3월1주

3월2주

3월3주

3월4주

3월5주

■ 자가검사키트 사용법 교육동영상 (★필히 시청)

1) 일반인용 (질병관리청 아프지마 TV) <https://www.youtube.com/watch?v=R08H8Fjajp0>

2) 어린이용(교육부 TV) <https://www.youtube.com/watch?v=nv7tR1jsGzs>

■ 검사결과 조치사항:

1) 음성이면 등교, **양성이면 등교중지 보건소 선별진료소를 방문하여 PCR검사 실시**

2) 검사결과: 등교 전, 자가진단(앱) 해당 문항에 '음성'임을 입력하고 등교 (담당선생님 확인)

3) **확인사항: 확진 후 격리해제자가 최초 확진일로부터 45일 이내인 경우에는 신속항원검사서 양성(재검출)이 될 수 있으므로 검사하지 않아도 됨**

2022.3.2.

정읍남초등학교장

뒷장- 자가검사키트 사용방법 참고해주세요.

SD바이오센서 자가검사키트 사용방법 (출처-SD바이오센서)
(★비강용이므로 반드시 멸균면봉을 양쪽 콧구멍의 약 1.5cm까지만 삽입해야 함)

① 검사 전 손을 깨끗이 씻고 완전히 말립니다.

② 구성품(검사용 디바이스, 멸균 면봉, 용액통 (튜브), 노즐캡(필터캡), 사용설명서)을 확인합니다.

구성품

사용방법 동영상

사용 방법 *검사 시 장갑을 착용하십시오.

1 용액 뚜껑 벗기기

⚠ 용액통의 용액을 쏟지 않도록 주의하십시오.

2 멸균 면봉 개봉

⚠ 면봉 머리부분에 손이 닿지 않도록 주의하십시오.

3 검체 채취

1.5cm 삽입 10회

⚠ 통통된 검체채취용 도구(멸균 면봉)를 비강(콧속)에 넣기 전까지 검체 추출액이나 다른 액체에 담그지 마십시오.

4 검체 버퍼 혼합

10회

5 노즐캡 눌러달기

6 검사용 디바이스에 4방울 떨어뜨리기

4 방울 15분 후 결과 확인

⚠ 용액통의 용액을 모두 짜지마십시오.

[음성]	[양성]	[무성]	[무효]

< 사용 시 주의사항 및 검사 결과 >

1. 용액이 코 점막이나 눈에 튀지 않도록 주의하고, 절대 섭취하지 않습니다.

2. 만 19세 미만이 사용할 경우에는 **보호자의 지도하에** 사용합니다.

3. 검사 결과 대조선(C)에만 한 줄로 나타나면 음성입니다.

4. **검사 결과 대조선(C)과 시험선(T)로 나타나면 양성**입니다. 두 줄로 확인된 키트를 투명 봉투에 넣고 **밀봉하여 지참**하고 신속하게 선별진료소 또는 임시선별검사소에 방문합니다.

5. **검사 결과가 시험선에 나타나거나, 아무런 선이 나타나지 않는다면 무효**입니다.