



코로나19 신속항원검사 자가진단키트 사용법 안내

교무실 535-2983
행정실 535-2973
<http://kyoam.es.kr>

안녕하세요?

학부모님 가정에 건강과 행운이 함께하기를 기원합니다.

코로나19 신속항원검사도구 자가진단키트 사용법을 안내드리오니 학부모님의 적극적인 협조 부탁드립니다.

1. 신속항원검사도구 자가진단키트 안내

가. 검사용 키트: 학교에서 배부합니다.

- 3.2(수) : 1회분의 자가진단키트를 보내드립니다.

나. 언제 검사하나요?

- 가정에서 매주 2회 (수, 일 저녁) 검사합니다.

다. 검사 결과 입력: 검사 다음 날 아침 등교 전 [건강상태 자가진단] 앱에 입력합니다.

라. 검사결과 음성이면

1) 검사 결과 음성이면 등교합니다.

2) **음성이더라도 임상증상이 있는 경우에는 등교하지 않고 지정의료기관을 방문하여 진료**를 받습니다.

3) 정읍시 호흡기 진료 지정의료기관

순	기 관 명	신속항원검사	PCR검사	전화번호
1	열린내과의원	○	○	532-5222
2	이가정의학과의원	○	x	533-7573
3	정읍이비인후과의원	○	x	537-0041
4	참여합의원	○	x	538-7500
5	탑가정의학과의원	○	○	532-2119
6	해맑은연합소아청소년과의원	○	x	532-3995
7	아나파신경과의원	○	x	927-8114
8	연희내과의원	○	x	533-8880
9	김형식내과의원	○	x	538-8275
10	정읍내과의원	○	x	533-6970

마. 검사결과 양성이면?

1) 담임선생님께 연락하여 주시고, **검사한 진단키트를 비닐에 밀봉 후 지참**하고 **선별진료소 방문하여 PCR 검사**를 받습니다.

2) 선별진료소

정읍시보건소	539-6112	정읍아산병원	530-6230
--------	----------	--------	----------

3) PCR 검사 결과가 나오기 전까지 등교중지(출석인정결석)

※ 신속항원검사는 의무는 아니지만 학생 본인과 가족을 위해 검사에 동참해 주세요.
검사를 하지 않았다고 해도 등교 가능합니다.

2. 신속항원검사도구 자가진단키트 사용법 안내

가. 교육부 동영상: <https://youtu.be/nv7tR1jsGzs>

나. 건강상태 자가진단 앱: 자가진단키트 사용법

다. 학교홈페이지/공지사항/유아,초등학생 등 어린이 대상 자가검사키트 사용법



2022. 3. 2.

교암초등학교장

아래 그림을 보고 사용방법을 숙지 후 따라하십시오.

코로나19 항원 자가검사 간단 사용 설명서

구성품



사용 방법

* 검사 시 장갑을 착용하십시오.

1 용액 뚜껑 벗기기



2 멸균 면봉 개봉



3 검체 채취



4 검체 버퍼 혼합



5 노즐캡 눌러닫기



6 검사용 디바이스에 4방울 떨어뜨리기



www.sdbiosensor.co.kr

SD 바이오센서

결과 해석

음성	양성	무효
<p>C T</p> <p>C라인만 나타남</p>	<p>C T</p> <p>C라인 T라인 모두 나타남</p>	<p>C T</p> <p>C 라인이 없음</p>