



## 코로나19 및 오미크론 대응 선제적 신속항원검사 실시 안내

최근 오미크론의 급격한 확산에 따라 우리 아이들을 감염병으로부터 보호하기 위해서는 더욱 각별한 주의가 요구되는 상황입니다. 이에 본교에서는 학생 건강을 지키고 안정적인 학교 교육활동을 유지하기 위해 등교 전 학생들을 대상으로 '**신속항원검사(RAT)**'를 시행하고자 안내하오니 **보내드리는 키트를 사용하셔서 가정에서 검사를 실시하여 주시기 바랍니다.**

※ **검체 채취 후 15분 뒤에 결과를 판독하시고, 30분 이상 초과 후 판독한 결과는 무효이므로 주의하시길 바랍니다.** (키트별로 상이할 수 있습니다)

검사결과	신속항원검사 키트 결과에 따른 협조 사항
음성	전날 시행한 검사결과를 자가진단(앱)에 입력 한 후 등교(2번 문항)
양성	즉시 담임교사에게 연락하여 주시고, 검사한 진단키트를 지참하여 가까운 선별진료소에 방문하여 PCR 검사를 실시하여 주시기 바랍니다. * PCR 검사결과가 나오기 전까지는 본인 및 형제.자매 등교중지(출석인정결석)

- ▶ **검사 제외자:** **확진 후 확진일로부터 45일 이내는 검사 불필요**
- ▶ **선제검사를 못한 경우:** 적극 권고 검사이나, 검사시행 여부와 상관없이 학교에 등교 가능.
- ▶ **키트 배부일정**은 학교에서 **수작업으로 이루어져 변동될 수 있습니다.**

일	월	화	수	목	금	토
[3월1주] 학생 주1회 [3월2주~3월5주] 학생 주2회, 교직원 주1회		3월1주 1 삼일절	2(개학일) ● 키트 배부 (학생1) ★ 저녁 검사 (학생)	3	4 ● 키트 배부 - 3월 2주분 - 학생2, 교직원1	5
3월2주 6 ★ 저녁 검사 (학생,교직원)	7	8	9 선거일 ★ 저녁 검사 (학생)	10	11 ● 키트 배부 - 3월 3주분 - 학생2, 교직원1	12
3월3주 13 ★ 저녁 검사 (학생,교직원)	14	15	16 ★ 저녁 검사 (학생)	17	18 ● 키트 배부 - 3월 4주분 - 학생2, 교직원1	19
3월4주 20 ★ 저녁 검사 (학생,교직원)	21	22	23 ★ 저녁 검사 (학생)	24	25 ● 키트 배부 - 3월 5주분 - 학생2, 교직원1	26
3월5주 27 ★ 저녁 검사 (학생,교직원)	28	29	30 ★ 저녁 검사 (학생)	31	일요일, 수요일 저녁! 우리 함께 검사해요	

2022. 3. 3.

전 주 오 송 초 등 학 교 장

아래 그림을 보고 사용방법을 숙지 후 따라하십시오.

## 코로나19 항원 자가검사 간단 사용 설명서

### 구성품



검사용 디바이스



용액통



노즐캡



멸균 면봉



비닐봉지



사용방법  
동영상



### 사용 방법

\* 검사 시 장갑을 착용하십시오.

#### 1 용액 뚜껑 벗기기



⚠ 용액통의 용액을 쏟지 않도록 주의하십시오.

#### 2 멸균 면봉 개봉



⚠ 면봉 머리부분에 손이 닿지 않도록 주의하십시오.

#### 3 검체 채취



⚠ 동봉된 검체채취용 도구(멸균 면봉)를 비강(콧속)에 넣기 전까지 검체 추출액이나 다른 액체에 담그지 마십시오.

#### 4 검체 버퍼 혼합



#### 5 노즐캡 눌러닫기



#### 6 검사용 디바이스에 4방울 떨어뜨리기



⚠ 용액통의 용액을 모두 짜지마십시오.