



# 가정통신문

## 선제적 신속항원검사 실시 안내문

전주시 덕진구 톨봇2길 9  
본 교무실 : 249-6107  
1학년교무실 : 249-6176  
2학년교무실 : 249-6161  
3학년교무실 : 249-6137  
행 정 실 : 249-6122  
F A X : 211-7725

학부모님, 안녕하십니까?

최근 오미크론이 확산됨에 따라 우리 아이들을 감염병으로부터 보호하기 위해서는 더욱 각별한 주의가 요구되는 상황입니다. 이에 본교에서는 학생건강을 지키고 안정적인 학교 교육활동을 유지하기 위해 등교 전 학생들을 대상으로 선제적 검사(신속항원검사=RAT)를 시행하고자 안내하오니 학생편에 보내드리는 자가진단키트를 이용하여 가정에서 안내문을 참고하여 실시하여 주시기 바랍니다.

1. 검사 기간	주 2회 하되 가능한 수, 일요일저녁 권장
2. 키트 배부	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3/2(수) 개학식에 학생별 1개의 자가진단 키트 배부(1차지원분)</li> <li>▶ 이후 2차 지원 배부 예정</li> <li>- 교육청으로부터 키트 수령일에 따라 배부일정 변경가능성 있음</li> </ul>
3. 검사방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 저녁검사한 후 다음날 <b>건강상태 자가진단 시 결과 입력</b></li> <li>▶ 신속항원검사키트에 있는 자가검사 사용설명서를 참고</li> <li>▶ 설명서 우측 상단 QR코드를 통해 사용방법 동영상을 확인</li> <li>▶ 사용설명서 동영상링크: <a href="https://school.jbedu.kr/jjg/M010311/view/4977740?">https://school.jbedu.kr/jjg/M010311/view/4977740?</a></li> </ul>
4. 결과에 따른 조치사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 선제검사 상 <b>음성인 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다음날 등교 전, 자가진단(앱)에 음성임을 입력하고 등교</li> </ul> </li> <li>▶ 선제검사 상 <b>양성인 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 즉시 <b>담임교사에게 연락</b>(문자 등),</li> <li>- 신속항원검사 키트를 밀봉하여 가까운 <b>선별진료소에서 가져가 PCR검사 실시</b></li> <li>→ PCR 검사결과 음성인 경우에는 '음성확인서'를 지참하여 등교</li> <li>(음성확인서는 보건소에서 발급한 문자메시지 등으로 갈음할 수 있음)</li> </ul> </li> </ul>

※ 선제검사는 의무사항이 아니며, 자율방역 취지에 맞게 실시하는 권고사항이나 적극적인 협조를 부탁드립니다.

※ 주의사항: 기확진자의 경우 **최초 확진일로부터 45일 이내에는** 신속항원검사에서 양성(재검출)이 될 수 있으므로 **검사 불필요**(접촉자 대상 신속항원검사 시에도 적용되는 원칙)

다만, 의료기관 진료 후 의사가 판단한 경우 해당 기간 중 검사 가능

[교육부 코로나19  
선제검사 운영 일정  
예시]

일	월	화	수	목	금	토
[3월1주] 학생 주1회 [3월2주~3월5주] 학생 주2회, 교직원 주1회		3월1주 1 삼일절	2(개학일)	3	4	5
3월2주 6	7	8	9 키트 배부 (학생1) 저녁 검사 (학생)	10	11 키트 배부 - 3월 2주분 - 학생2, 교직원1	12
3월3주 13 저녁 검사 ★(학생,교직원)	14	15	16 9 선거일 저녁 검사 ★(학생)	17	18 키트 배부 - 3월 3주분 - 학생2, 교직원1	19
3월4주 20 저녁 검사 ★(학생,교직원)	21	22	23 저녁 검사 (학생)	24	25 키트 배부 - 3월 4주분 - 학생2, 교직원1	26
3월5주 27 저녁 검사 ★(학생,교직원)	28	29	30 저녁 검사 (학생)	31	일요일, 수요일 저녁! 우리 함께 검사해요	

2022. 03. 03.

양현고등학교장 직인생략

# 코로나19 항원 자가검사 간단 사용 설명서

## 구성품



검사용 디바이스



용액통



노즐캡



멸균 면봉



비닐봉지

▶  
사용방법  
동영상




## 사용 방법 \* 검사 시 장갑을 착용하십시오.

### 1 용액 뚜껑 벗기기



### 2 멸균 면봉 개봉

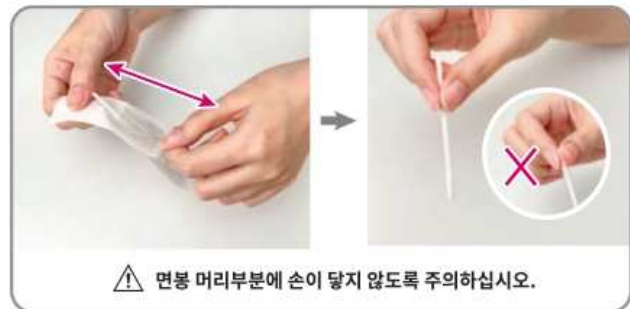

### 3 검체 채취



### 4 검체 버퍼 혼합



### 5 노즐캡 눌러닫기



### 6 검사용 디바이스에 4방울 떨어뜨리기

